

WAARSCHUWING

Aangezien u zelf de moeite heeft genomen om een afdruk van uw oor te laten maken voor uw persoonlijke oordoppen mag het logisch zijn dat deze voor u zijn, en voor u alleen. Het lijkt overbodig om te vermelden maar er zijn duidelijk minder slimme mensen daar buiten dus we zeggen het toch... Het is ons op de basisschool geleerd om te delen, doe dit echter NIET! Niet met uw oordoppen in ieder geval. Naast dat ze niet zullen passen is het ook nog eens onhygienisch en kan voor allerlei oorwas uitwissel problemen zorgen. Gewoon niet doen!

CUSTOM SLAAP DOPJES

Whooptidoo, u bent nu de trotse eigenaar van dit ongelooflijk geniale stukje kunst gemaakt door ears4U. Wij begrijpen dat u veel te enthousiast bent om ze direct te gaan gebruiken maar voordat u dat doet zijn er een paar dingen die goed zijn om te weten. Dus lees vooral verder...

Om er voor te zorgen dat het draagcomfort optimaal blijft is het raadzaam om uw oren regelmatig te controleren op verstopping door oorwas. Raadpleeg hiervoor uw arts. Ook de gehoorbeschermers behoeven enig onderhoud. Hierover meer bij onderhoud op de andere zijde.



www.ears4u.nl | info@ears4u.nl |

CUSTOM SLAAP DOPJES

PLAATSEN IN HET OOR

Uw Ears4u slaapdoppen zijn handgemaakt met liefde en aandacht om zich heerlijk in uw oor te nestelen. Voor optimaal comfort gebruikt u het passende dopje bij het juiste oor, wat betekent... Het dopje met de rode stip naar boven in uw rechter oor en het dopje met de blauwe stip naar boven in uw linker oor.



Pak de dop tussen duim en wijsvinger. Kijk zorgvuldig naar de dop, zorg dat de stip naar boven wijst. Breng nu langzaam, voorzichtig en met liefde en aandacht de dop naar het oor, draai hem een kwartslag naar achter en breng hem aan in het oor. Dit moet comfortabel voelen en NIET pijnlijk zijn op welke manier dan ook. Wanneer het pijnlijk is om de dop te dragen neem dan direct contact op met ears4U.



VERWIJDEREN UIT HET OOR

Wanneer het tijd is om wakker te worden en u wil de slaapdoppen verwijderen, ruk deze dan niet klakkeloos uit uw oor. Maar opnieuw met liefde en aandacht. Zet uw duim aan de onderkant tegen de rand van de dop en duw deze rustig omhoog en haal de dop uit uw oor.



ONDERHOUD

Deze slaapdoppen hebben geen geluidsopeningen waar oorwas in kan gaan zitten. Dat scheelt een hoop gedoe met borsteltjes. De oordoppen zijn voorzien van een antibacteriële lak die gereinigd kan worden met een vochtig doekje en eventueel alcohol. U kunt deze bijsluiters ook openen en downloaden door de QR code te scannen

